



ANESTESIA
TERAPIA FRÍA



CRYOPAD®
El frío que sienta bien



Value Life

CRYOPAD® diseñado por Antarctic Medical Laboratory

Cryopad® es una compresa fría para crioterapia local externa. Es un dispositivo médico de clase I. Su sistema patentado de precorte permite que se adapte perfectamente al tamaño y la forma de la zona a tratar.


Frío terapéutico de larga duración

El frío de las compresas Cryopad® llega a los tejidos subcutáneos más profundos. Proporciona hasta **3 horas de tratamiento**.

Funciona según tres etapas sucesivas:

1. Un rápido choque térmico de 10 minutos +/-5min reduce la temperatura cutánea por debajo de +12°C.
2. La temperatura cutánea se mantiene por debajo de +12°C durante las siguientes 1 a 1,5 horas.
3. El aumento de la temperatura en los tejidos cutáneos y subcutáneos se ralentiza durante 1 a 1,5 horas. Para una completa seguridad, la temperatura cutánea no debe ser inferior a + 6° +/-1°C. Durante esta fase, el frío penetra en los tejidos subcutáneos.

Cryopad® Arsine 57 (Temperatura ambiente 21.7°C)

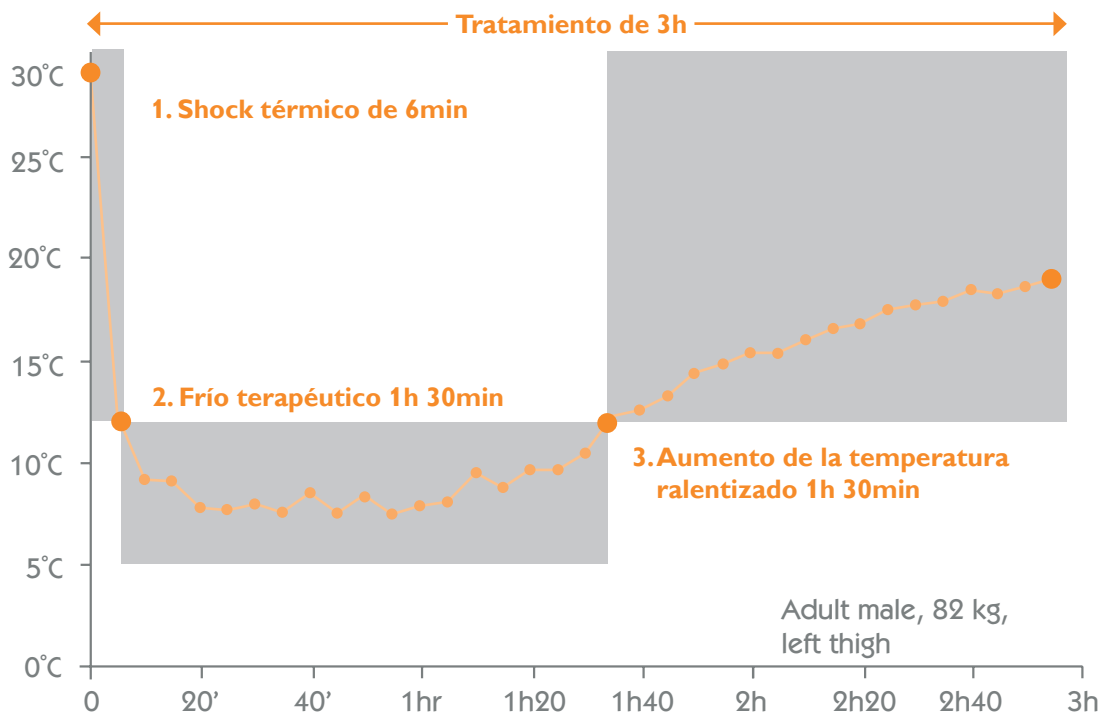

CRIOTERAPIA
Tratamiento con frío



MOLDEABLE
Se ajusta a las
necesidades de uso



EMBALAJE
y packaging customizado

Se adapta a todas las partes del cuerpo

La compresa Cryopad® es naturalmente flexible.

Para un uso más eficiente, utilice el sistema patentado de precorte para separar uno o más elementos que se ajusten lo máximo posible a la forma de la zona a tratar.


Indicaciones de uso para Cryopad®

• Tratamiento no invasivo y localizado del dolor agudo, los hematomas y el hematoma cutáneo, que se encuentran, entre otras, en las siguientes áreas:

- Cirugía - pre y postoperatoria
- Traumatología reciente
- Maxilofacial
- Odontología
- Estomatología
- Postparto (episiotomía, mastitis y hemorroides)
- Algodistrofia
- Neuralgia

- Anestesia cutánea para procedimientos quirúrgicos superficiales
- Parte del tratamiento para la cefalalgia leve

Efecto de las compresas Cryopad®

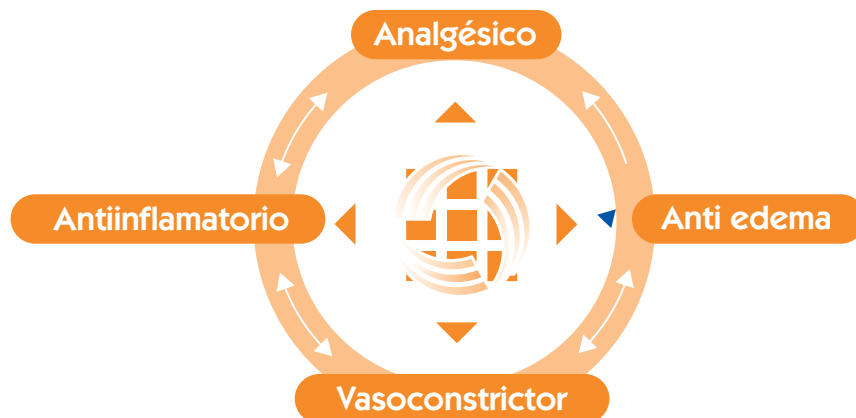


Fácil, seguro y económico




- Se coloca directamente sobre la piel
- No se requiere monitorización específica durante el tratamiento
- Protege de los riesgos inherentes a las quemaduras de hielo
- Asegura un uso cómodo para el paciente
- No tiene ningún efecto secundario previsible
- Descontaminado con rayos gamma
- Minimiza la recontaminación de la superficie gracias a su doble embalaje patentado (gama Arsine & Brenva)
- Producto desechable después del tratamiento

Referencias y características

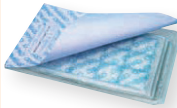- Gama hospitalaria

Referencia	Código	Dimensiones Cryopad®		Presentación	Número de compresas	Cantidad / Caja	Resistencia mecánica	Foto
		Longitud (cm)	Anchura (cm)					
Arsine 52 FR	ARSINE 52 FR	23	9,6	Bandeja	8 / Bandeja	36	Reforzado	
Arsine 53 FR	ARSINE 53 FR	23	14,4	Bandeja	8 / bandeja	27		
Arsine 55 FR	ARSINE 55 FR	24	23	Bandeja	8 / bandeja	18		
Arsine 57 FR	ARSINE 57 FR	33,6	23	Bandeja	8 / bandeja	18		

- Gama farmacéutica

Referencia	Código	Dimensions Cryopad®		Número de usos	Presentación	Número de compresas	Cantidad / caja	Resistencia mecánica	Foto
		Longitud (cm)	Anchura (cm)						
Chavière 56	CHAVIERE 56 FR	23	28,8	12	Bandeja	1 / bandeja	45	Reinforced	
Chavière 59	CHAVIERE 59 FR	23	43,2	12	Bandeja	1 / bandeja	45		
Chavière 512	CHAVIERE 512 FR	24	57,6	12	Bandeja	1 / bandeja	45		



Antartic medical

es un laboratorio francés que ha desarrollado compresas de crioterapia.

La crioterapia es una excelente terapia ampliamente reconocida en la comunidad científica por los beneficios y ventajas que puede ofrecer el frío como tratamiento médico.

Antartic Medical se inició a partir de la experiencia adquirida por su fundador a través del contacto diario con el campo médico y al notar que los dispositivos existentes ofrecían poca o ninguna efectividad y presentaban varias desventajas como riesgos de quemaduras, contaminación, transferencia microbiana y la mayoría de las veces no se ajustaban a las diversas formas de las partes del cuerpo que requerían tratamiento.

El primer uso del frío en medicina fue reportado por Hipócrates (-460 -377 a.C.), quien usaba nieve

y hielo por sus efectos analgésicos para aliviar el dolor. No fue hasta los años 70 que los investigadores se dieron cuenta de la importancia científica de los efectos del frío en el cuerpo humano y más tarde en los animales.

Un producto de crioterapia médica local debe cumplir con criterios precisos para ser eficaz y sin riesgos.

Antartic Medical ha invertido 4 años en I+D para desarrollar la compresa fría CRYOPAD®.

Se trata de la primera compresa fría de crioterapia, externa, localizada, moldeable y con un gel de contacto en el interior.

Crioterapia:

Un método terapéutico que utiliza el frío en varias formas (hielo, paquetes congelados, nitrógeno líquido, hielo seco o gas de crioterapia) para reducir la inflamación, combatir el dolor, los hematomas y ciertas contracturas musculares o para tratar ciertas dermatosis (afecciones de la piel). Los resultados se obtienen a causa de los efectos fisiológicos del frío: vasoconstricción, es decir, reducción del tamaño de los vasos sanguíneos, lo que conlleva una disminución del flujo sanguíneo; reducción de la producción de sustancias químicas que causan la inflamación; detención de la función de las terminaciones nerviosas responsables del dolor y relajación de los músculos.



CRYOPAD® diseñado por Antartic Medical Laboratory

ANESTESIA & EMERGENCIAS

Para más información: administracionventas@vygon.com

Las especificaciones que figuran en el presente folleto tienen carácter informativo y no son, en ningún caso, de carácter contractual.

Vygon Ciudad de Sevilla, 34.
Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 PATERNA - VALENCIA
Recepción: 902.876.288 | Servicio contables: 961.344.364
Servicios de marketing: 961.344.745 | Servicios comerciales: 902.876.288
Fax.: 902.876.289 www.vygon.es


www.vygon.es