

Acceso Vascular
SUREFUSER™ +



difusor portátil
de uso único

Definición

DISPOSITIVO MEDICO EXTERNO de flujo continuo o variable, que permite la administración de soluciones medicamentosas en **TRATAMIENTOS INTRA O EXTRAHOSPITALARIOS**.


AUTONOMO. No necesita ni alimentación eléctrica ni intervención de la gravedad, ni equipos suplementarios. El dispositivo está graduado de antemano para un flujo continuo o variable para una larga o corta duración.

Indicaciones

El *Surefuser*TM + se utiliza para terapia de perfusión de medicamentos: quimioterapia, antibioterapia, control del dolor, ...


Características

El *Surefuser*TM + se utiliza para terapia de perfusión de medicamentos: quimioterapia, antibioterapia, control del dolor, ...

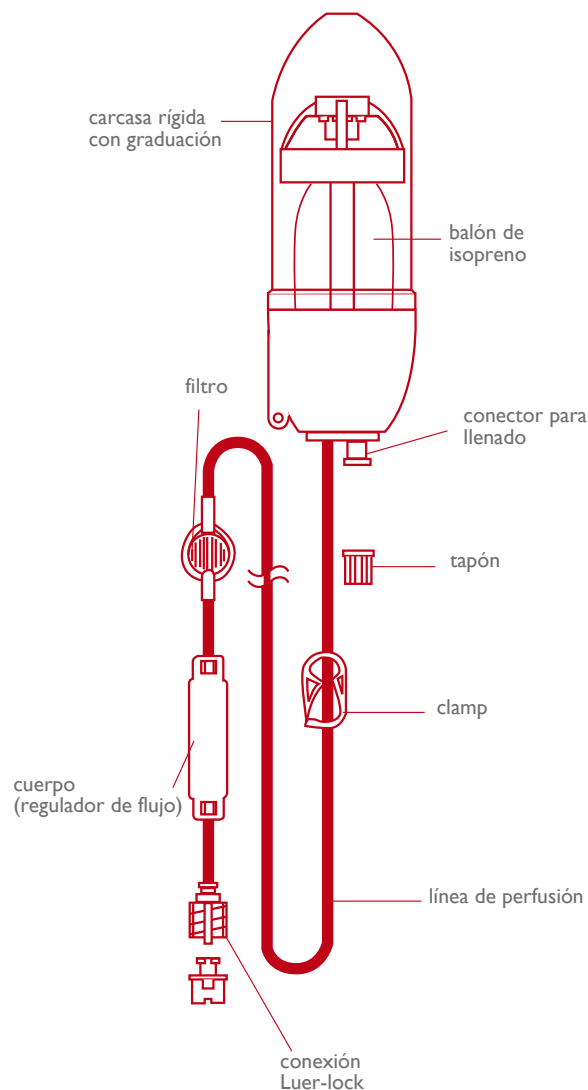


Funcionamiento

preparación de la solución medicamentosa

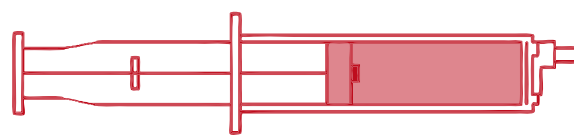

jeringa


cuerpo del balón

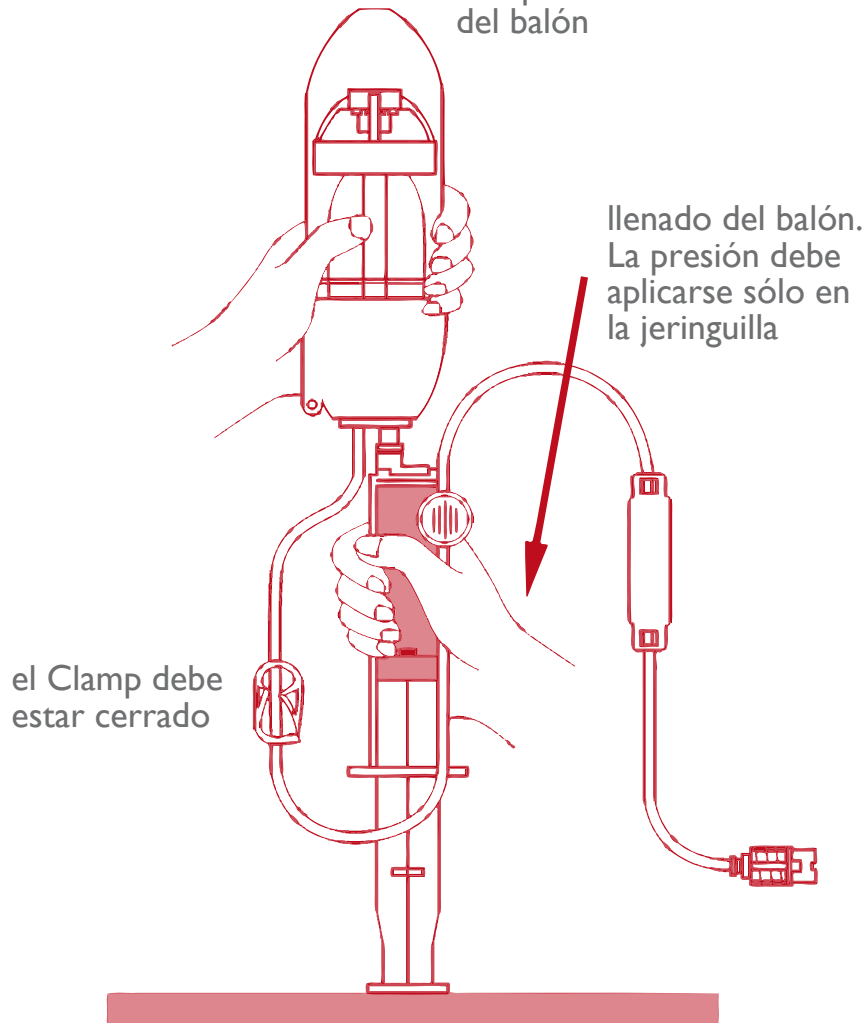

el Clamp debe estar cerrado

llenado del balón.
La presión debe aplicarse sólo en la jeringuilla

purga de la línea de perfusión

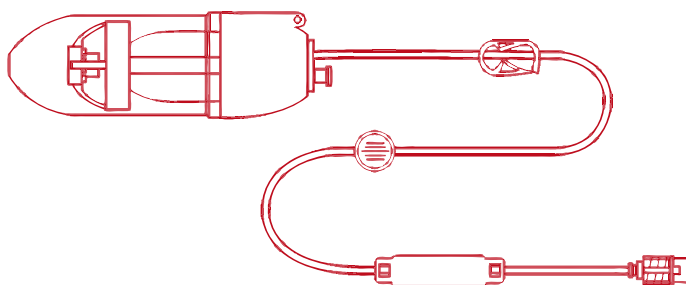

línea de perfusión

Las ventajas del Surefuser™ +



1 El filtro mejora la seguridad del paciente. Se trata del filtro de partículas y de aire más pequeño del mercado = 0,2 µm



2 Gracias a su carcasa rígida, el Surefuser™+ no se puede romper y no hay ningún riesgo de presión externa sobre el flujo. Su diseño estudiado de forma ovoide evita que el paciente se haga daño con el Surefuser™+ y es fácil de disimular.



3 La graduación sobre la etiqueta permite visualizar el desarrollo de la perfusión. Reduce el riesgo de errores.



4 La tubería anti-acodamiento anula el riesgo de modificación del flujo de la perfusión. Su estructura en isopreno disminuye los riesgos de alargamiento.



5 La unidad de control de flujo es plana y de color, permite un reconocimiento sencillo del Surefuser™+. Esta unidad de control es termosensible (se aplica sobre la piel del paciente) y garantiza la calidad de flujo. Es menos molesta en la piel del paciente.

 Gama

Surefuser™ + : Perfusión continua							
50 ml Surefuser™+		100 ml Surefuser™+		250 ml Surefuser™+			
Código	ml/hr	Código	ml/hr	Código	ml/hr	Tiempos de perfusión	Código de color
SFS-0505HRP	10.0	SFS-1005HRP	20.0			5 horas	Violeta
SFS-0512HRP	4.2	SFS-1012HRP	8.4			12 horas	Rosa
SFS-0501DP	2.1	SFS-1001DP	4.2	SFS-10-25P	10.0	1 día	Azul
SFS-0502DP	1.0	SFS-1002DP	2.0	SFS-5-25P	5.0	2 días	Verde
SFS-0503DP	0.7	SFS-1003DP	1.4	SFS-3-25P	3.0	3 días	Crema
SFS-0505DP	0.4	SFS-1005DP	0.8	SFS-2-25P	2.0	5 días	Amarillo
SFS-0501WP	0.3	SFS-1001WP	0.6	SFS-1-25P	1.0	1 semana	Naranja
10 por caja/30 por cartón		10 por caja/30 por cartón		5 por caja/15 por cartón			

Surefuser™ + : Perfusión de corta duración					
100 ml Surefuser™+			250 ml Surefuser™+		
Código	ml/hr	Código	ml/hr	Tiempos de perfusión	Código de color
SFS-1030MP	200.0			1/2 hora	Blanco
SFS-1001HRP	100.0			1 hora	Gris pálido
		SFS-250-25P	250.0	1 hora	Violeta claro
		SFS-125-25P	125.0	2 horas	Rosa salmón
		SFS-62-25P	62.5	4 horas	Caqui
10 por caja/30 por cartón			5 por caja/15 por cartón		

Surefuser™ + : Perfusión variable				
100 ml Surefuser™+		250 ml Surefuser™+		
Código	ml/hr	Código	ml/hr	Código de color
SMA-0123-10P	0.5 - 1.5 - 2.5 - 3.5	SMA-2345-25P	2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0	Verde
SMA-2345-10P	2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0	SMA-2468-25P	2.0 - 4.0 - 6.0 - 8.0	
SMA-123-10P	Off - 1.0 - 2.0 - 3.0	SMA-3456-25P	3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0	
10 por caja/30 por cartón		5 por caja/15 por cartón		

 Novedades

- Disponibilidad de fundas foto y termoprotectoras.
- Volumen residual menor de 2.5ml

Para más información, póngase en contacto: comercial@vygon.es

Las especificaciones contenidas en este folleto son únicamente informativas y no son, en ningún caso, de naturaleza contractual.

Vygon – Ciudad de Sevilla, 34. Pol. Ind. Fuente del Jarro • 46988 • PATERNA • VALENCIA
Recepción: 902.876.288 – Servicio contables: 961.344.364
Servicios de marketing: 961.344.745 – Servicios comerciales: 902.876.288
Fax.: 902.876.289 • www.vygon.es

