


CÓMO CARGAR SUREFUSER PASO A PASO

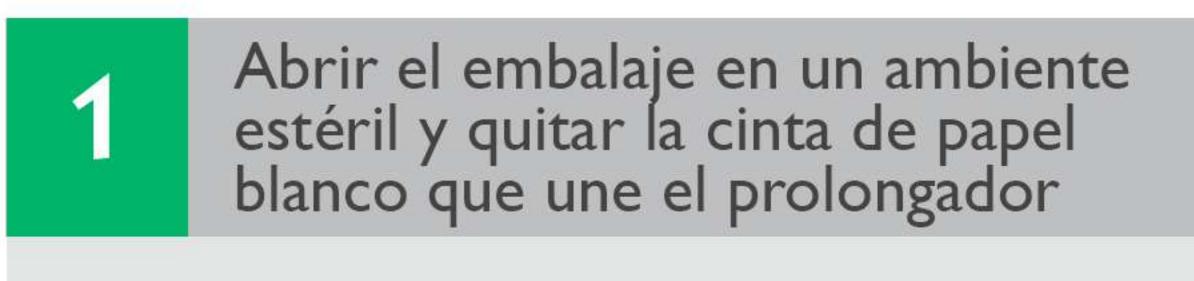

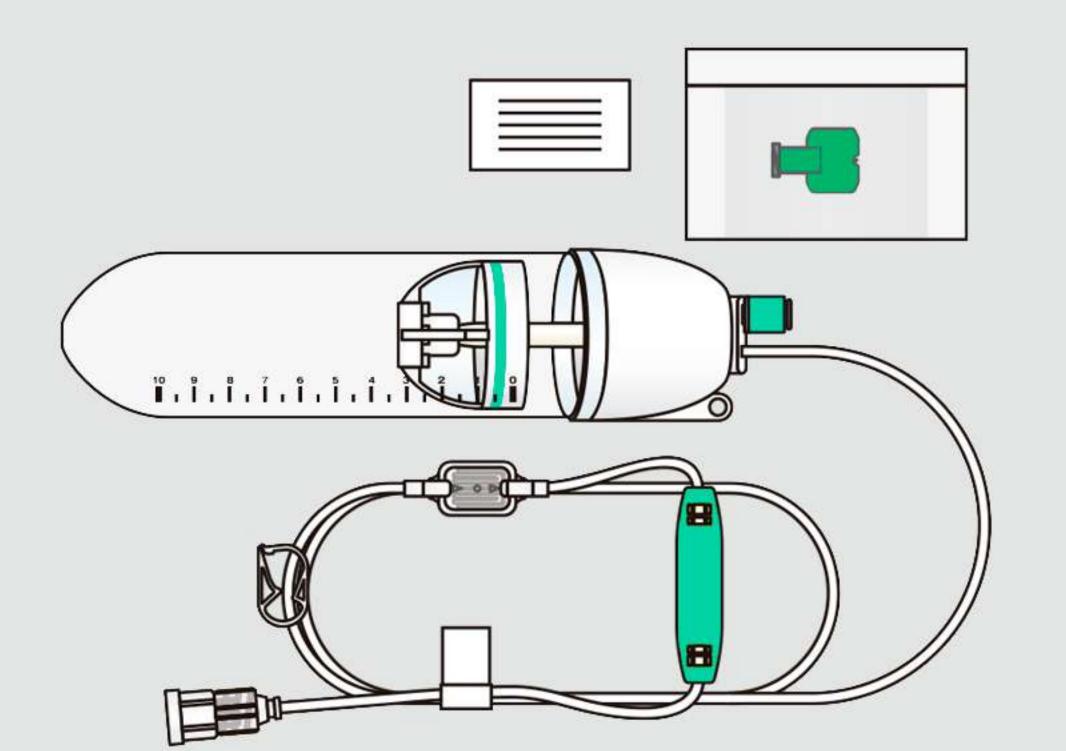



Cerrar el clamp Robert situado en el prolongador

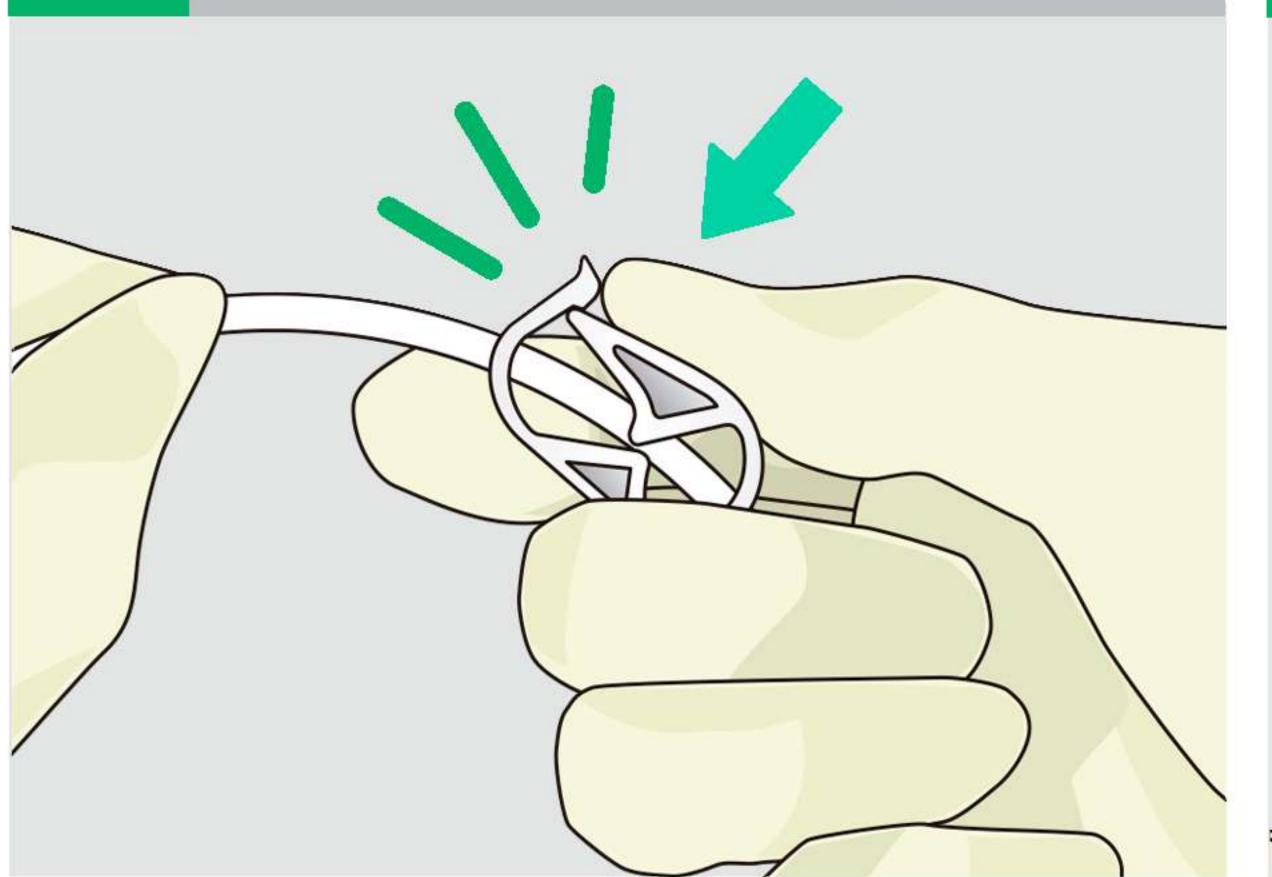


Preparar jeringa luer lock con solución diluyente (sin fármaco). Asegurar que se han eliminado las burbujas de aire.



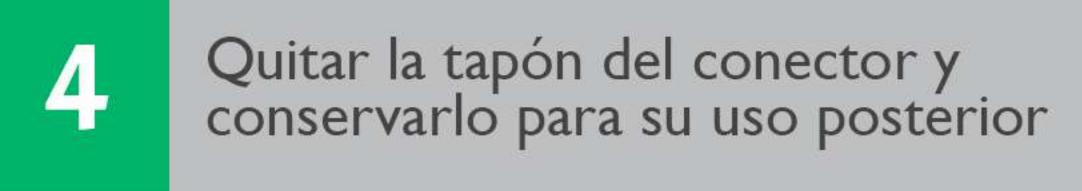


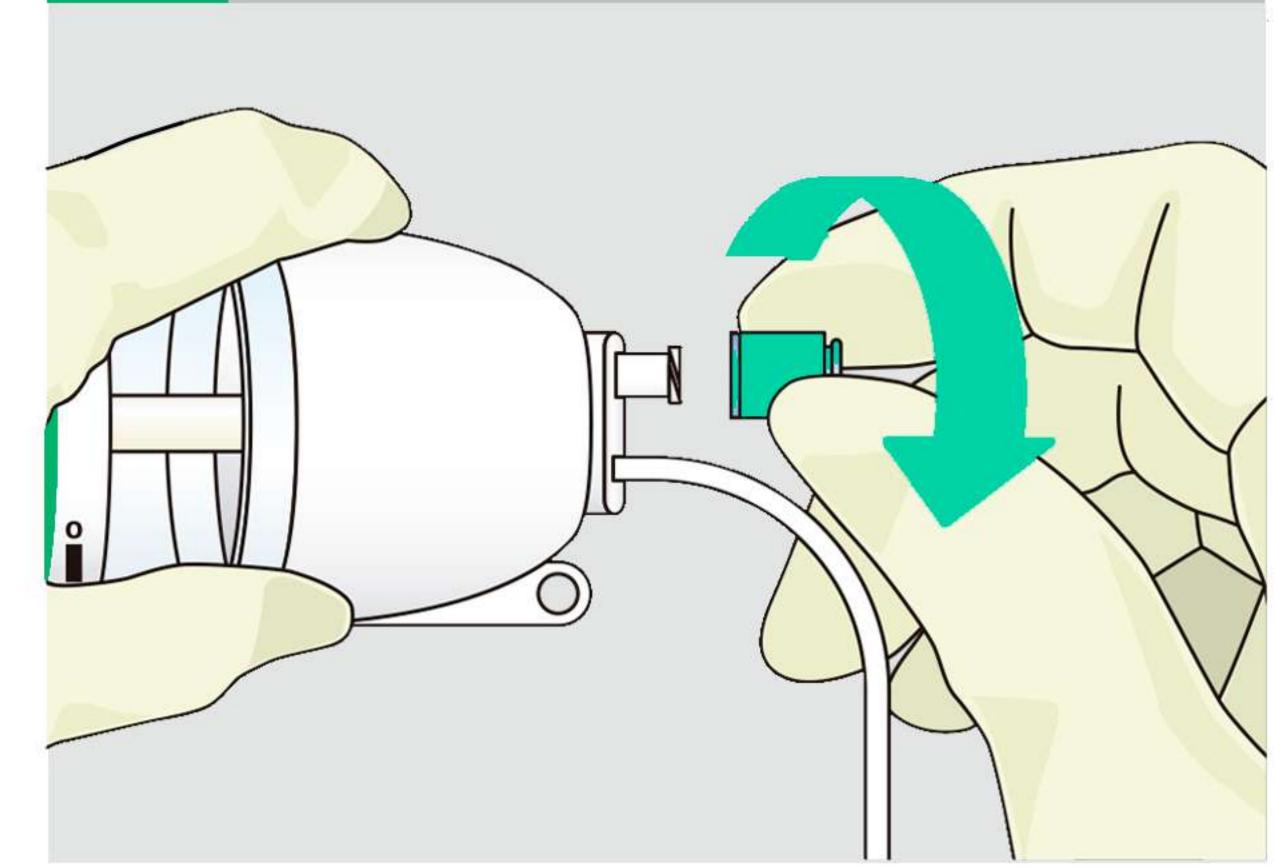


Conectar la jeringa que contiene el diluyente al conector de llenado

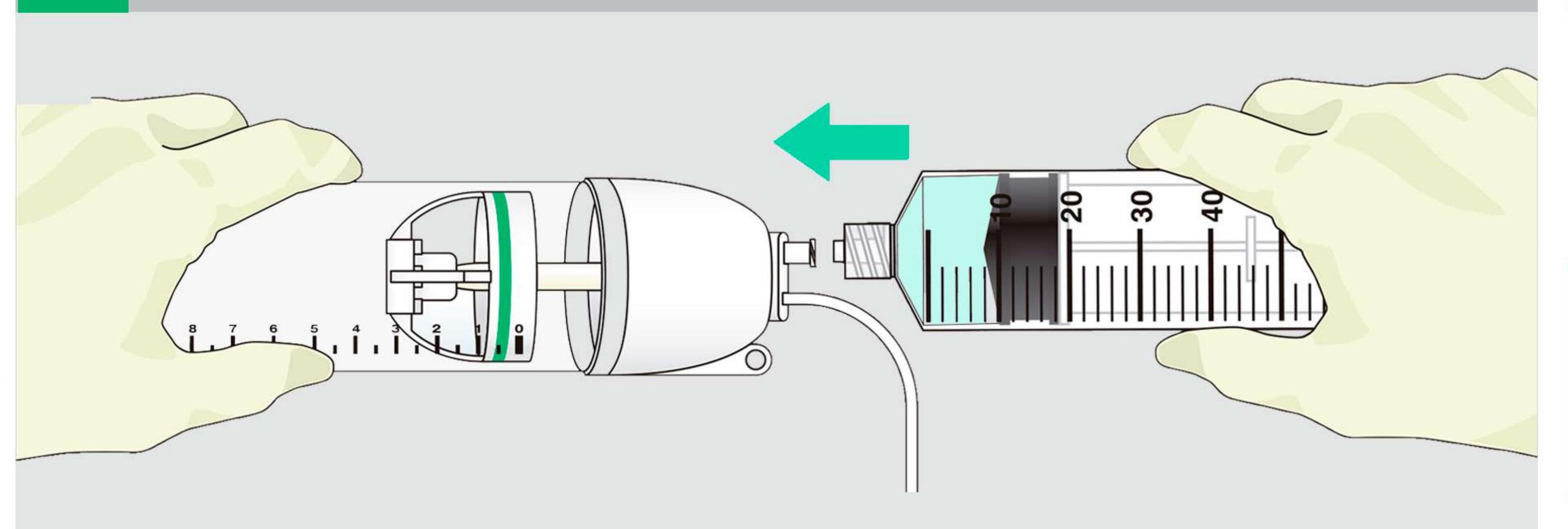


Colocar el émbolo en una superficie plana y sólida. Sujetar la jeringa de forma segura. Presionar hacia abajo lentamente

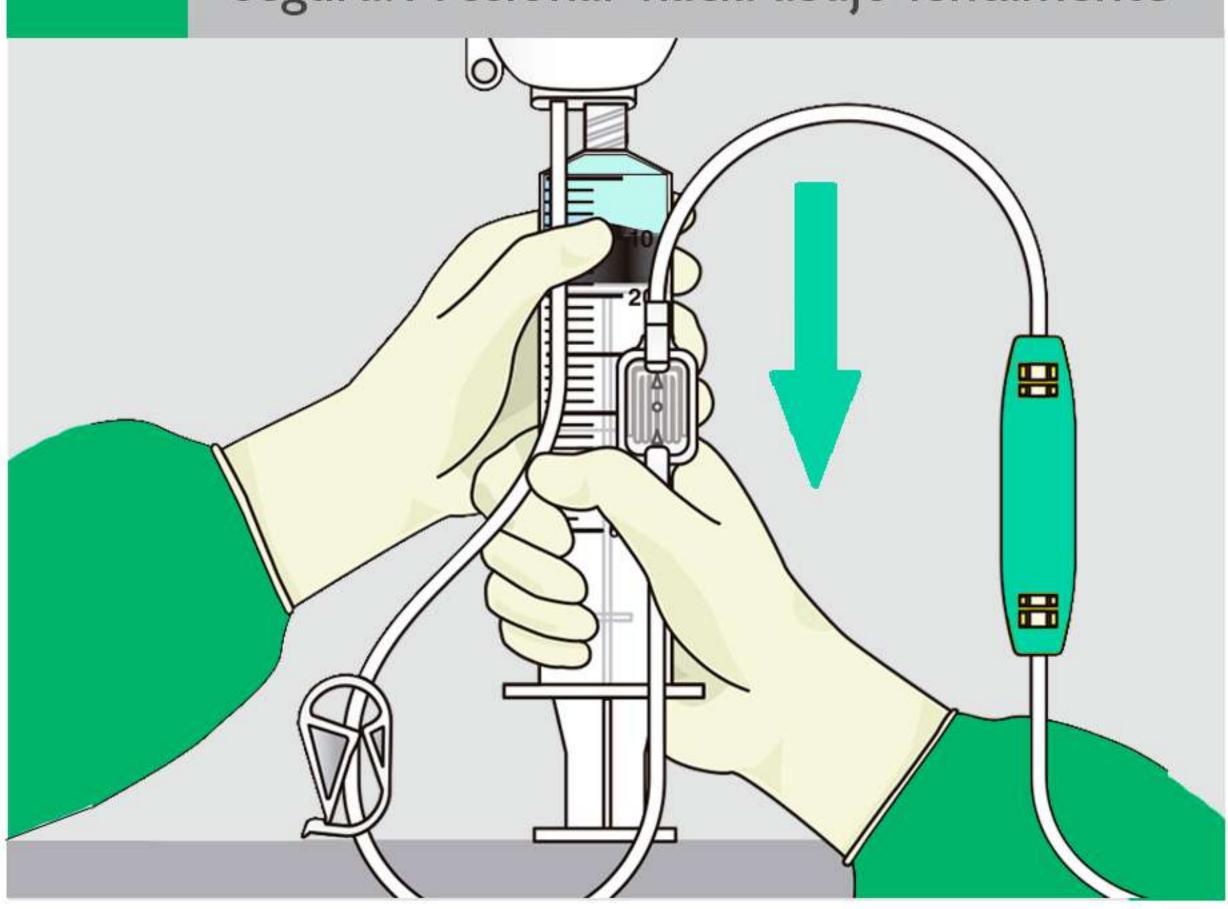


Cuando la jeringa esté vacía, desconectarla del dispositvo

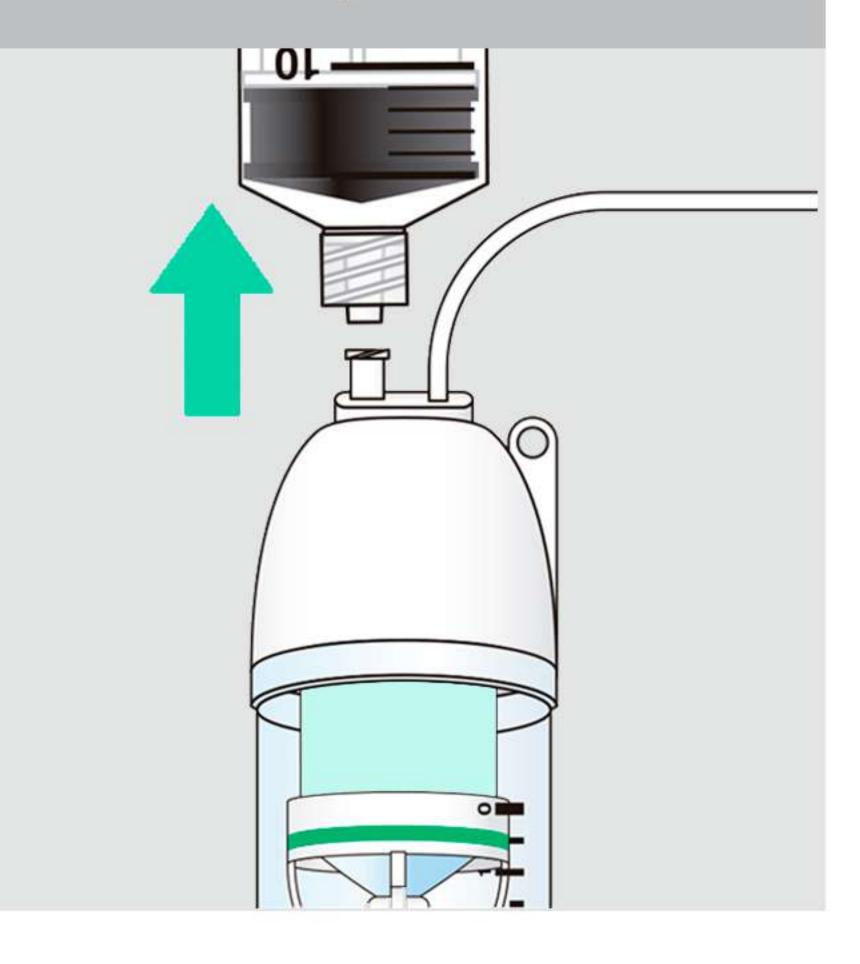


Abrir el clamp Robert

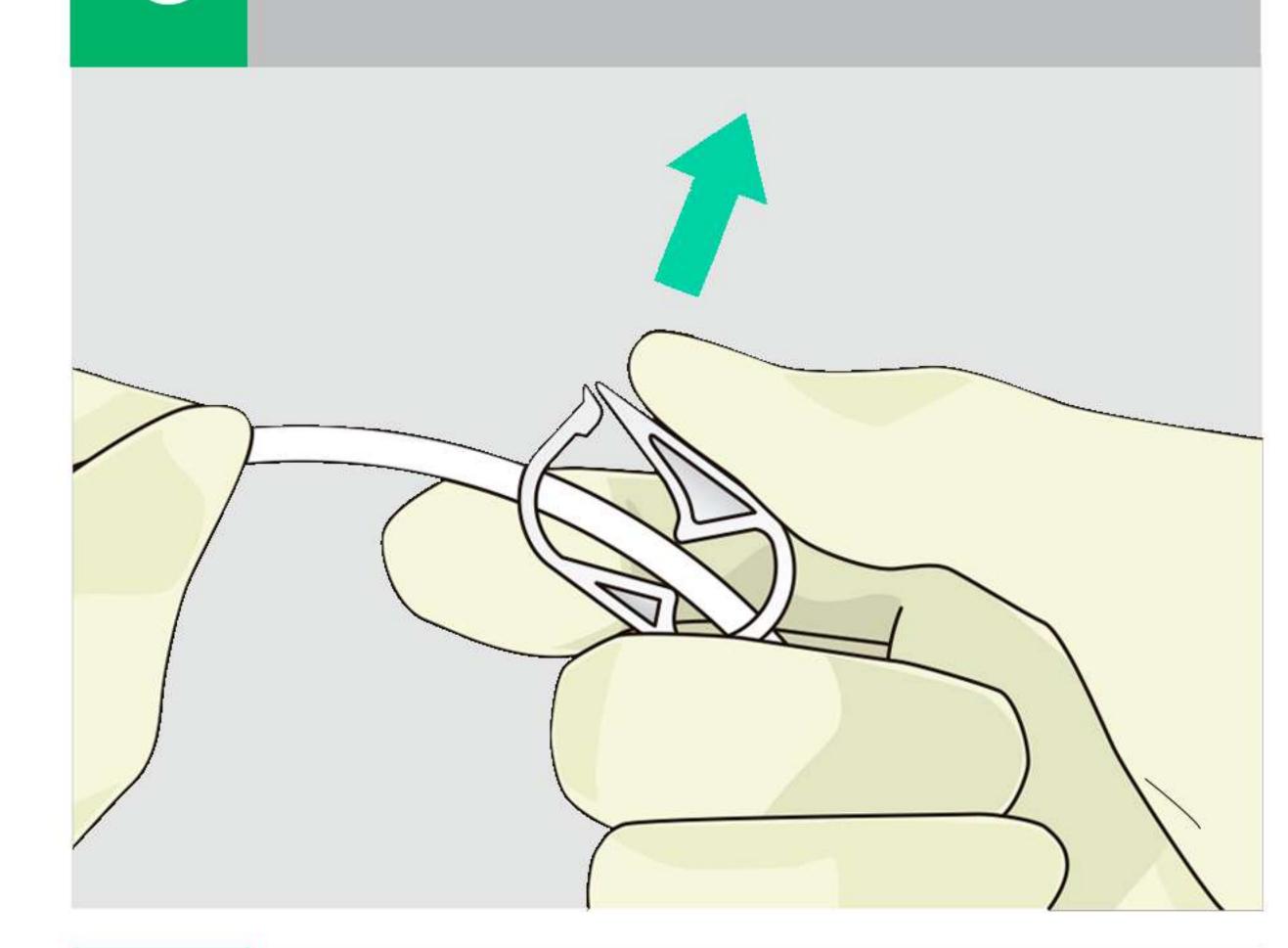


Sostener el filtro del prolongador asegurando que la dirección de la flecha está mirando hacia arriba

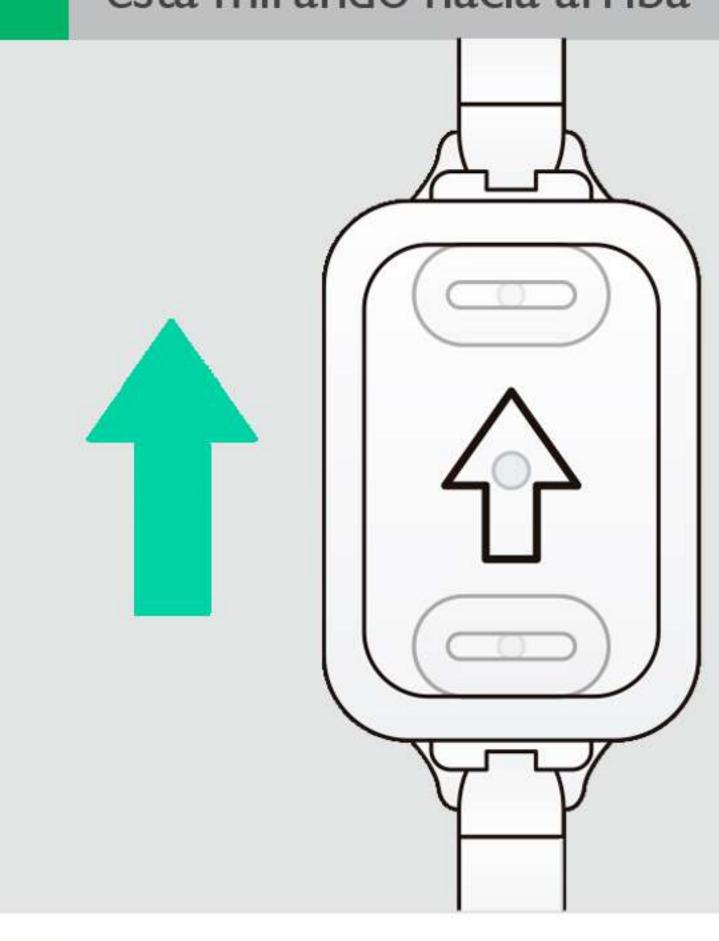


La solución diluyente fluirá a través del prolongador

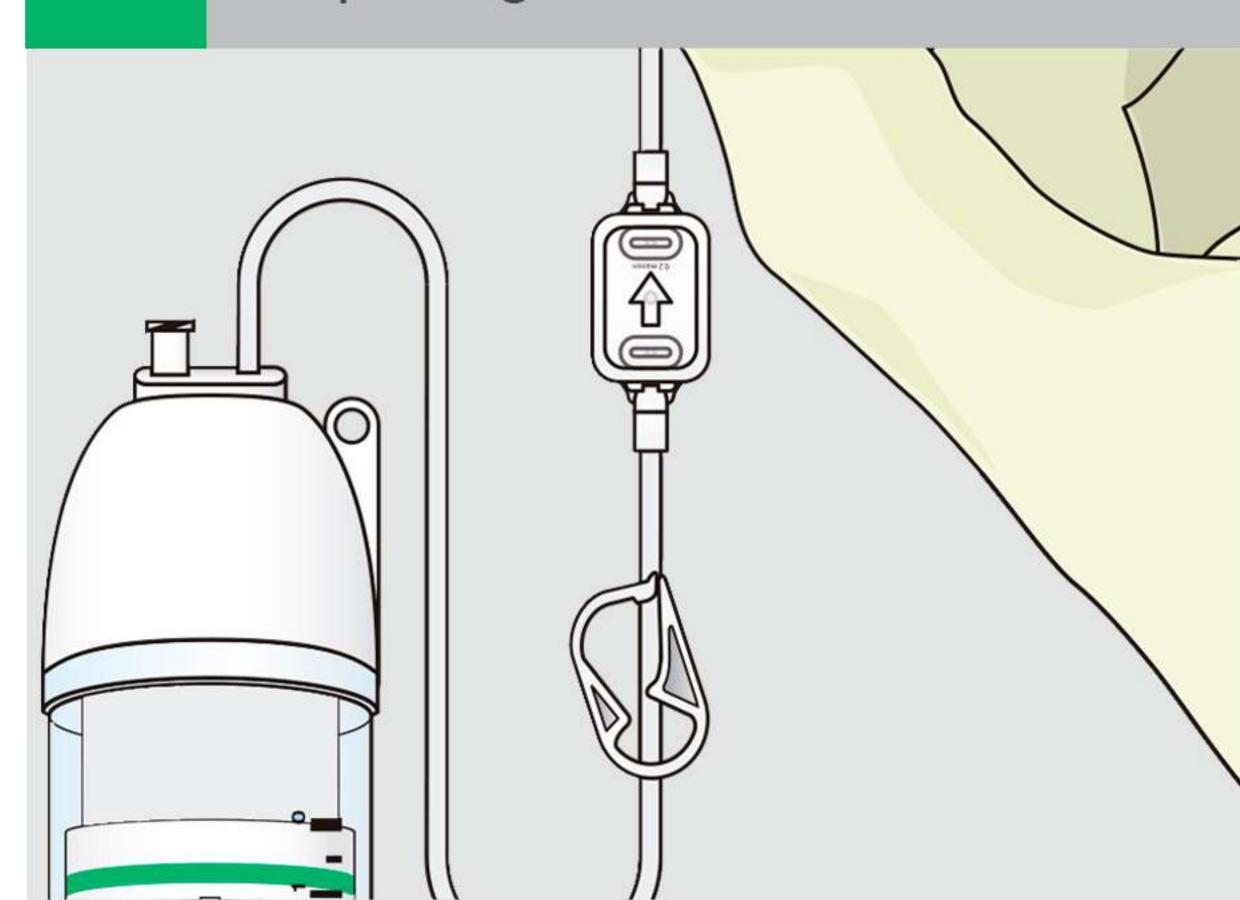


Al observar una gota de líquido al final del prolongador el proceso estará completo

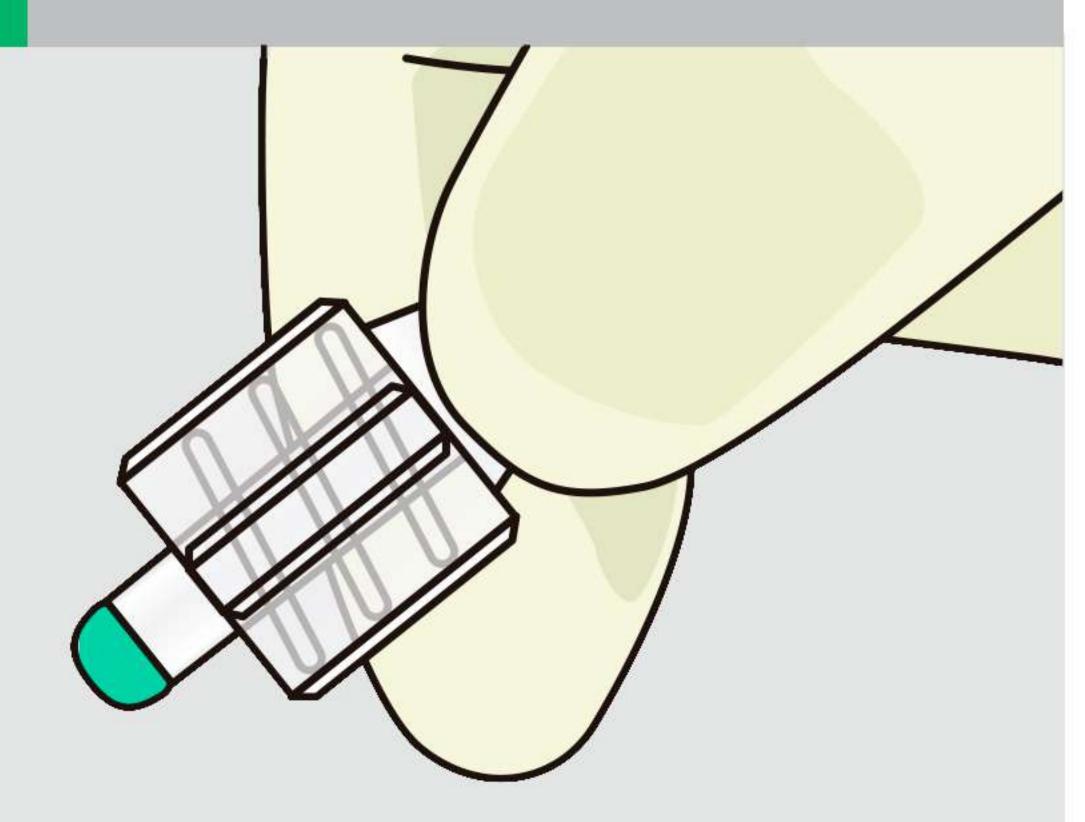

19 Cerrar el clamp Robert

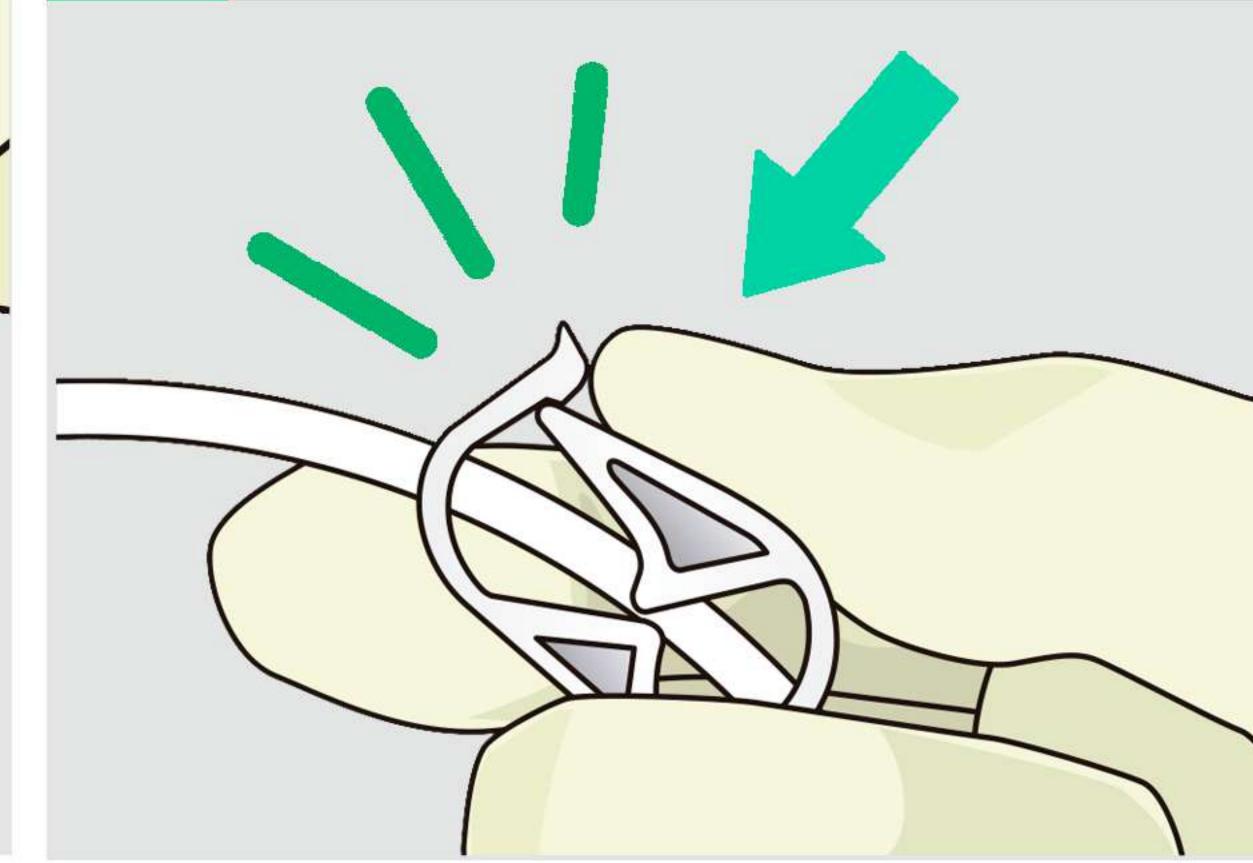

Cerrar el extremo del prolongador con el tapón protector (envasado por separado)

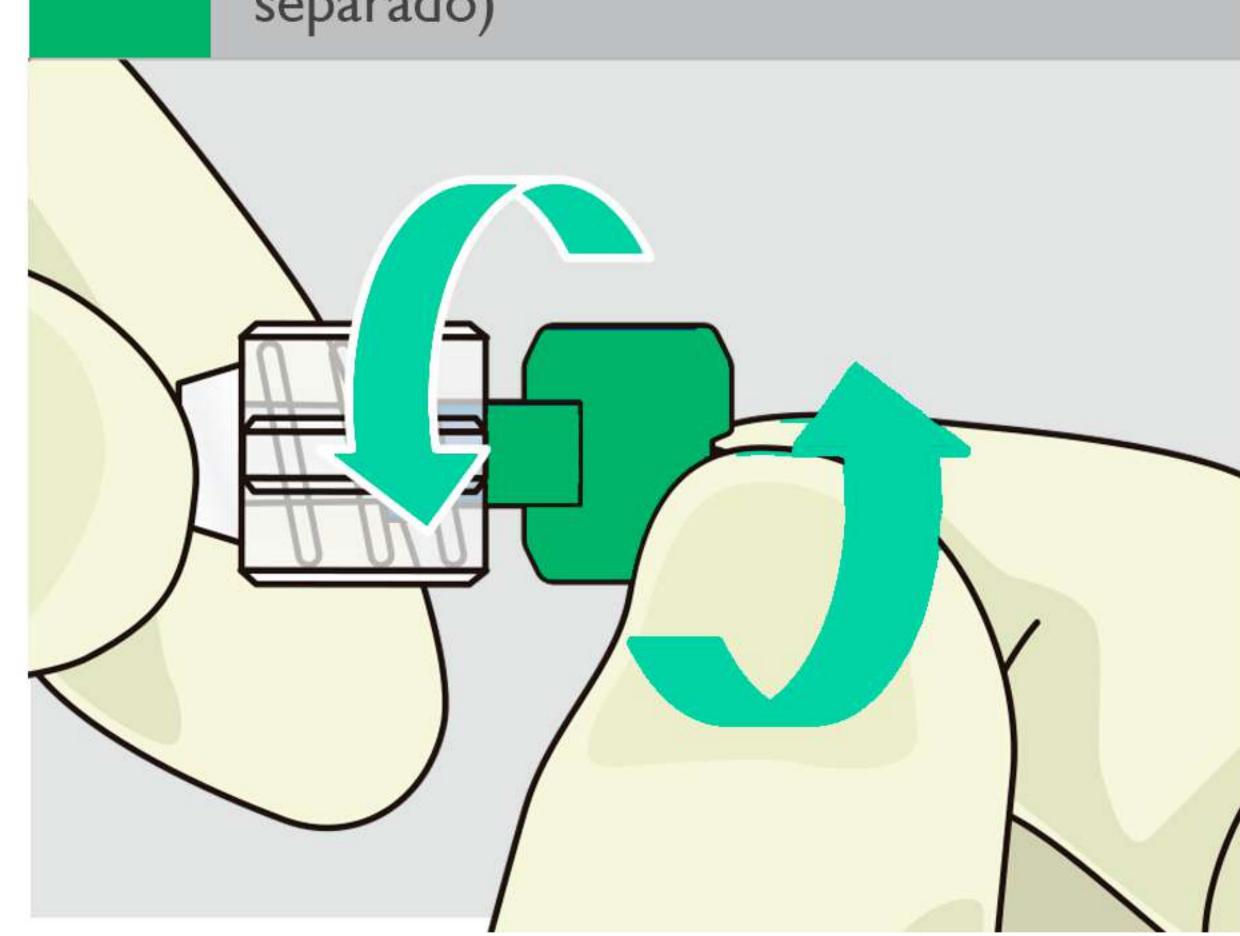


Prepara las jeringas con el fármaco.


Asegurar se han eliminado las burbujas de aire



Llenar la bomba con la medicación según prescripción. Repetir hasta que el infusor alcance el volumen correcto. Utilizar la misma técnica de la preparación

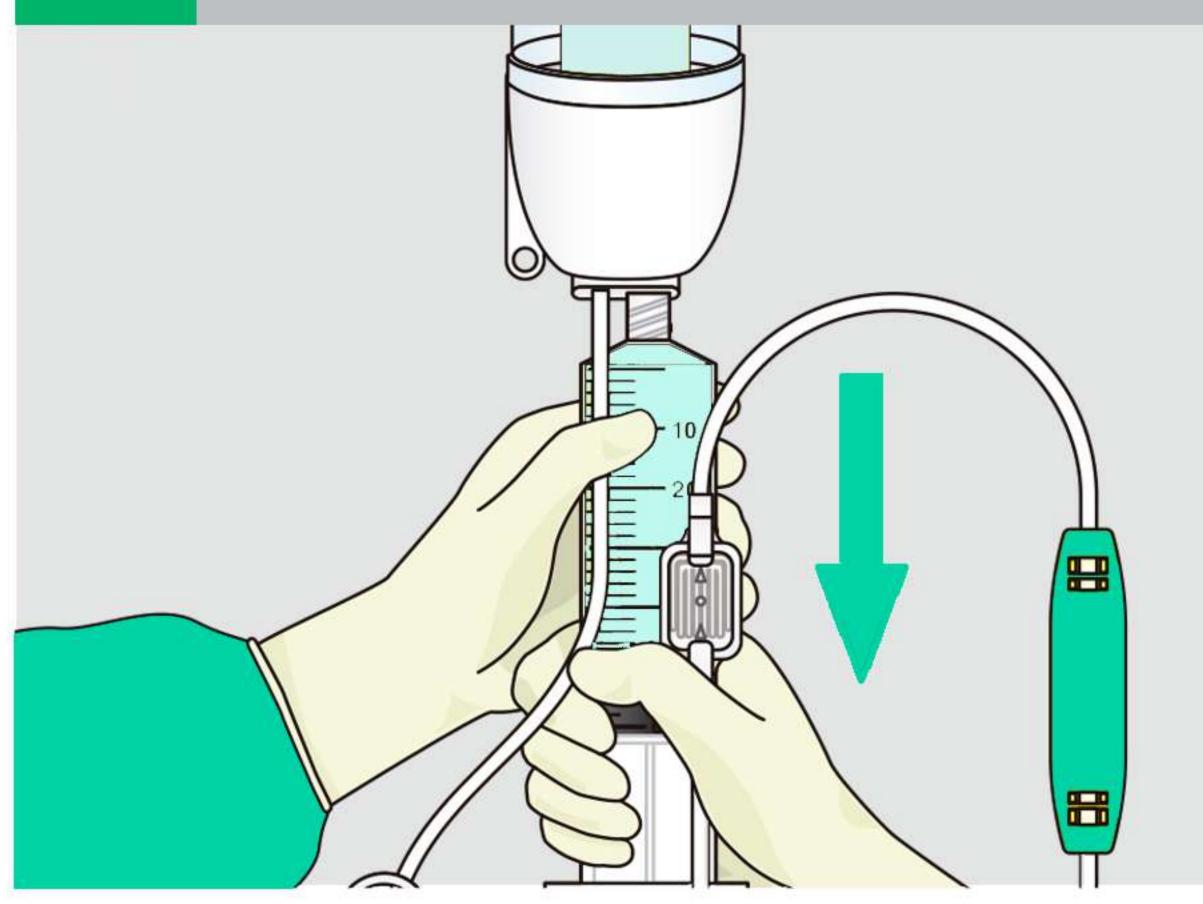

Cerrar el conector con el tapón guardado al comenzar la preparación

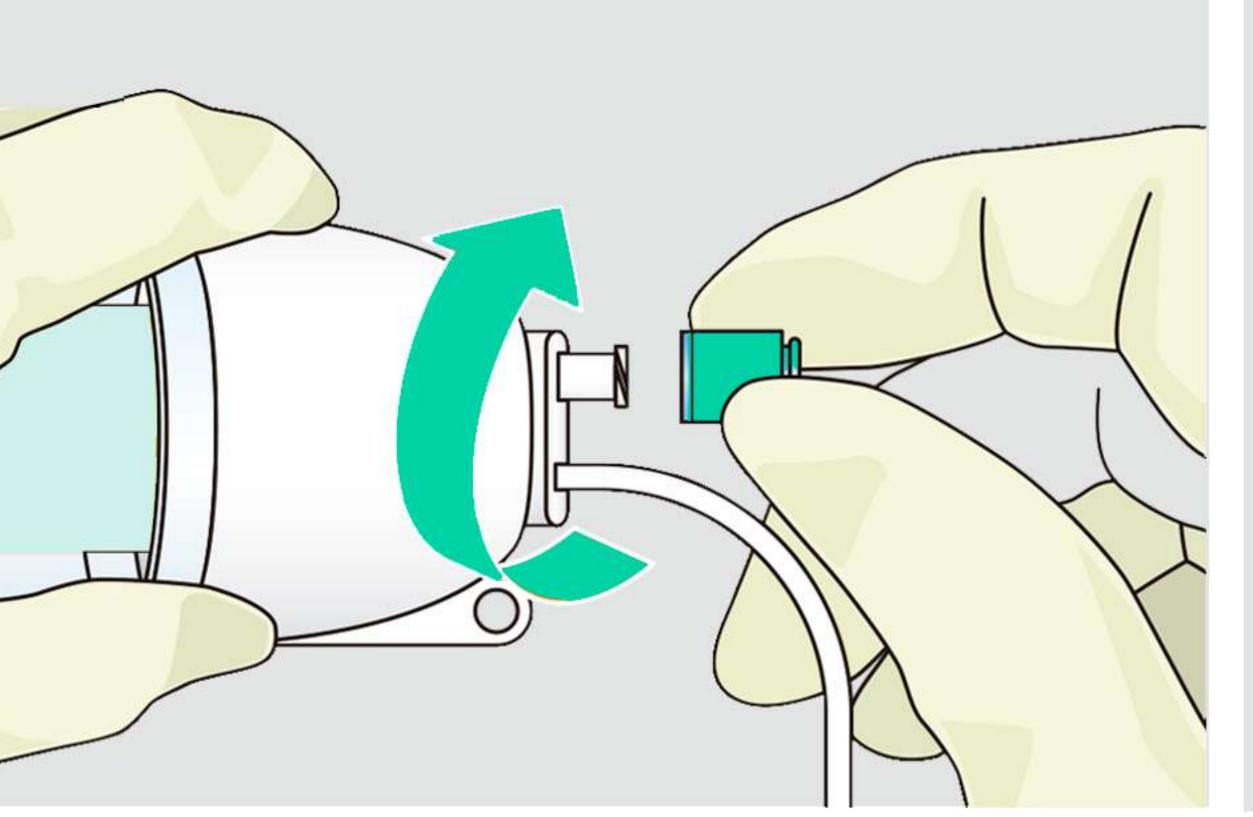

El infusor se encuentra cargado y listo para ser conectado al paciente

